

Votre clariti® 1 day multifocal évolue

# DÉCOUVREZ CLARITI® 1 DAY MULTIFOCAL, EN MIEUX !\*<sup>1,2</sup>

**NOUVEAU**



**1<sup>er</sup> avril 2026**

**Disponibilité de clariti® 1 day multifocal 3 additions, nouveau système optique**

**31 juillet 2026**

**Arrêt de clariti® 1 day multifocal 2 additions (lentilles d'essai et de vente)**

**clariti® 1 day multifocal**

**Rééquipez les porteurs**

<b>Matériau</b>	Silicone Hydrogel, somofilcon A avec WetLoc® Technology
<b>Dk/e<sup>+</sup></b>	86
<b>Teneur en eau</b>	56%
<b>Géométrie</b>	Binocular Progressive System™ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Add LOW : Asphérique, VP centrale, large zone VL</li> <li>• Add MEDIUM : Asphérique VP centrale, zone VP/VI élargie</li> <li>• Add HIGH : VP centrale sphérique, double zone de VI<sup>†</sup></li> </ul>
<b>Épaisseur au centre</b>	0,07 mm
<b>Diamètre Ø<sub>r</sub></b>	14,10 mm
<b>Rayon R<sub>o</sub></b>	8,60 mm
<b>Gamme</b>	-12,00D à +8,00D -10,00D à +8,00D par 0,25 Au-delà par 0,50 Additions : Low (+0,75 à +1,25D) Med (+1,50 à +1,75D) High (+2,00 à +2,50D)
<b>Filtre UV<sup>‡</sup></b>	Oui
<b>Conditionnement</b>	Boîtes de 30 et 90
<b>Renouvellement</b>	Journalier
<b>Indication</b>	Presbytie


\*Vision de près et de loin améliorée, mesurée à deux semaines de port journalier. Acuité visuelle de loin logMAR -0,05 vs -0,02 (p < 0,01) ; acuité visuelle de près 0,06 vs 0,11 (p = 0,02) pour Binocular Progressive System™ vs 2 add respectivement. †@(-3.00DS) x 10<sup>-3</sup> [(cm/sec) x (ml O<sub>2</sub>)/(ml x mmHg)] ‡Les lentilles de contact bloquant les UV contribuent à protéger les yeux contre la transmission des rayons UV nocifs, mais ne remplacent pas un équipement de protection oculaire absorbant les UV, telles que les lunettes de protection ou les lunettes de soleil, car elles ne couvrent pas intégralement les yeux ni la zone environnante. Les porteurs de lentilles de contact doivent continuer à utiliser des dispositifs oculaires absorbant les UV, conformément aux recommandations de leur professionnel de la vue.

Votre clariti® 1 day multifocal évolue

# UNE GÉOMÉTRIE DE POINTE<sup>1</sup>

## Binocular Progressive System™

Système multifocal innovant à 3 additions qui utilise différentes combinaisons de géométries pour optimiser la vision à tous les degrés de presbytie<sup>1</sup>

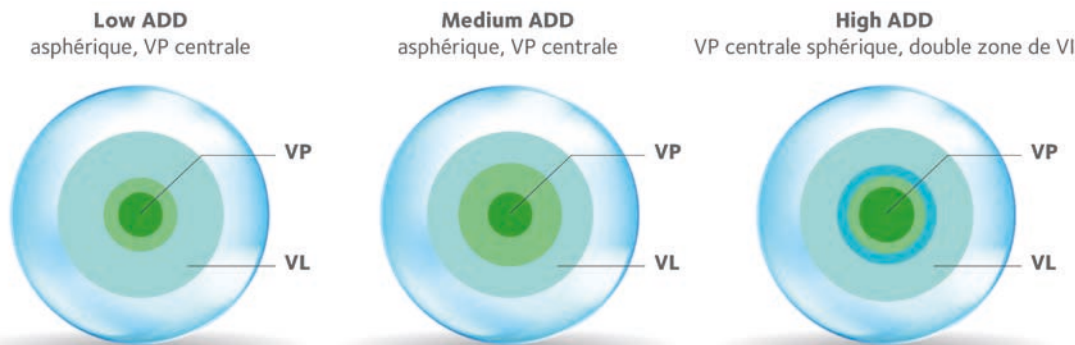

Pour illustration uniquement

## PROTOCOLE EN 3 ÉTAPES

### 1 RÉFRACTION

- ➔ **Maximum convexe VL** : Réfraction du jour : Equivalent sphérique (DVO)
- ➔ **Œil préférentiel VL : méthode du flou réfractif** : Oeil le plus gêné au passage d'une face +0,75D
- ➔ **Addition minimum VP** : Add totale = Add minimum (déchiffrage P2) + 0,75D

### 2 SÉLECTION DES LENTILLES

ÂGE*	≤ 50 ans	50 à 55 ans	≥ 55 ans
ADD TOTALE	≤ + 1,25D	+1,50 et +1,75D	≥ + 2,00D
ŒIL PRÉFÉRENTIEL VL	LOW	LOW	LOW
ŒIL VP	LOW	MÉDIUM	HIGH

### 3 OPTIMISATIONS

- VL : -0,25D sur l'œil préférentiel de loin
- VP : +0,25D sur l'œil de près

## OptiExpert<sup>®</sup> vous simplifie le choix de la lentille

Téléchargez dès à présent OptiExpert<sup>®</sup> ou rendez-vous sur [www.cooper-vision.fr/outils-et-calculatrices](http://www.cooper-vision.fr/outils-et-calculatrices)



OU FLASHEZ  
CE QR CODE



## L'expertise au service de la vision.

\*A titre indicatif. †OptiExpert<sup>®</sup> est un outil d'éducation, de référence et d'information pour les professionnels de la vue qui peuvent choisir d'utiliser l'application dans le cadre de leur propre évaluation des patients, mais il n'est pas destiné à être utilisé pour la prise de décision clinique. OptiExpert<sup>®</sup> n'est pas destiné à constituer et ne constitue pas un avis médical ou optométrique, et n'est pas non plus destiné à remplacer l'évaluation du patient réalisée par un professionnel de la vue.

### Références :

1. Données internes CVI, 2024. 2. Données internes CVI, 2022. Etude prospective, croisée, bilatérale, sujet masqué, en port journalier avec dispensation sur 4 sites cliniques américains ; n=58 porteurs habituels de lentilles de contact souples multifocales.

Les lentilles de contact souples clariti<sup>®</sup> 1 day multifocal (somofilcon A) sont indiquées pour la correction de l'emmetropie, myopie ou hypermétropie avec presbytie. Ces lentilles jetables journalières, à usage unique, ne doivent être portées qu'une seule fois et jetées après chaque utilisation. Ne pas dormir avec.

Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice et l'étiquetage. Pour les informations relatives à la sécurité du dispositif, aux réglementations locales, précautions, indications, contre-indications et avertissements, veuillez consulter la notice d'utilisation. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non-contre-indication médicale au port de lentilles et soumis à une prescription médicale. Dispositifs médicaux de classe IIa. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE0123. Fabricant : CooperVision Manufacturing Ltd. Dispositifs médicaux non pris en charge par l'Assurance Maladie excepté si prescription dans les indications suivantes : astigmatisme irrégulier, myopie ≥ 8,00D, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie à 3,00D, kératocône. COOPERVISION SAS au capital de 71 712€ dont le siège social est situé Immeuble Les 2 Arcs bât B - 1800 Route des Crêtes B.P. 273 - 06905 Sophia Antipolis Cedex, France et immatriculée au RCS de Grasse sous le n°39200221800049. Support à destination des professionnels. Février 2026. COO-0387-035.

clariti<sup>®</sup>, WetLoc<sup>®</sup>, OptiExpert<sup>®</sup> et Binocular Progressive System™ sont des marques déposées et des marques commerciales de The Cooper Companies, Inc. et de ses filiales. Images des emballages des produits à des fins d'illustration seulement.

© 2026 CooperVision

CLMFASIL26. Agence Cinquième Etage, 2/4 Bd Jean Jaures, 45000 Orleans. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.



CooperVision<sup>®</sup>