

Mensuelle multifocale

Biofinity® multifocal

Des géométries permettant
aux deux yeux de travailler
ensemble¹



**Facilité² et succès
d'adaptation élevé³**



**Vision nette à toutes
les distances¹**



**Excellent
confort¹**

Matériau Silicone Hydrogel, comfilcon A avec Aquaform® Technology

Dk/e* 142 (à -3,00D)

Teneur en eau 48%

Géométrie Balanced Progressive® Technology :
- Lentille « D » : VL centrale
- Lentille « N » : VP centrale

Épaisseur 0,09mm (@ -3,00D)

Diamètre Ø_T 14,00 mm

Rayon R₀ 8,60 mm

Gamme -10,00D à +6,00D
-6,00D à +6,00D par 0,25
Au-delà par 0,50
Additions :
+1,00, +1,50, +2,00, +2,50D

Conditionnement Boîtes de 6

Renouvellement Mensuel

Entretien Solution multifonctions ou oxydante

Indication Presbytie

*En moyenne, 88% sont tout à fait ou plutôt d'accord. †Analyse rétrospective; n=55 sujets (110 yeux); corrections +1.25D à -3.25D, additions +1.25 à +2.50D. ‡@(-3.00DS) x 10⁻⁹ [(cm/sec) x (ml O₂)/(ml x mmHg)]

Références :

1. Données internes CVI, 2024. 2. Données internes CVI, 2021. Sondage en ligne Decision Analyst auprès de 376 professionnels de la vue prescripteurs de Biofinity® aux États-Unis, Japon, Allemagne, France et Espagne.

3. Données internes CVI, 2019.




Biofinity® multifocal

UNE GÉOMÉTRIE DE POINTE

Balanced Progressive® Technology

Des géométries optimisées pour chaque sphère et chaque addition, pour une adaptation individualisée et une vision nette à toutes les distances¹

Pour illustration uniquement

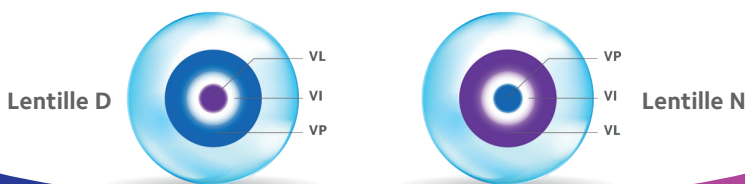

PROTOCOLE EN 3 ÉTAPES

1 RÉFRACTION

- ▶ **Maximum convexe VL**
 - Réfraction du jour : Equivalent sphérique (DVO)
- ▶ **Œil préférentiel VL : méthode du flou réfractif**
 - Œil le plus gêné au passage d'une face +0,75D
- ▶ **Addition minimum VP**
 - Add totale = Add minimum (déchiffrage P2) +0,75D

2 SÉLECTION DES LENTILLES

ÂGE*	≤ 50 ans	50 à 55 ans	≥ 55 ans	
ADD TOTALE	≤ + 1,25D	+1,50 et +1,75D	≥ + 2,00	≥ + 2,50
ŒIL PRÉFÉRENTIEL VL	D Add +1,00	D Add +1,50	D Add +2,00	D Add +2,50
ŒIL VP	N Add +1,00	N Add +1,50	N Add +2,00	N Add +2,50

(Les combinaisons D+D ou N+N peuvent également être utilisées)

3 OPTIMISATIONS

- VL : -0,25D sur l'oeil préférentiel de loin
- VP : +0,25D sur l'oeil de près

L'expertise au service de la vision.

*A titre indicatif.

Les lentilles de contact souples Biofinity® multifocal (comfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie, accompagnée de presbytie. Ces lentilles jetables mensuelles sont à usage journalier, nécessitent un entretien adapté à la fin de la journée et doivent être jetées 1 mois après le début de l'utilisation. Ces lentilles peuvent également être utilisées en port prolongé jusqu'à 6 nuits/7 jours uniquement sur avis médical.

Veillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice et l'étiquetage. Pour les informations relatives à la sécurité du dispositif, aux réglementations locales, précautions, indications, contre-indications et avertissements, veuillez consulter la notice d'utilisation. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non-contre-indication médicale au port de lentilles et soumis à une prescription médicale. Dispositifs médicaux de classe IIa. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE0123. Fabricant : CooperVision Manufacturing Ltd. Dispositifs médicaux non pris en charge par l'Assurance Maladie excepté si prescription dans les indications suivantes : astigmatisme irrégulier, myopie ≥ 8,00D, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie à 3,00D, kératocône. COOPERVISION SAS au capital de 71 712€ dont le siège social est situé Immeuble Les 2 Arcs bât B - 1800 Route des Crêtes B.P. 273 - 06905 Sophia Antipolis Cedex, France et immatriculée au RCS de Grasse sous le n°39200221800049.

Septembre 2025. Support à destination des professionnels. COO-0387-027.

Biofinity®, Aquaform® et Balanced Progressive® sont des marques déposées de The Cooper Companies, Inc. et de ses filiales. Images des emballages des produits à des fins d'illustration seulement.

© 2025 CooperVision

BMFPOS026. Adresse Cinquième Etage, 2/4 Bd Jean Jaures, 45000 Orléans.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.



CooperVision®

