


MyDay[®] multifocal

Des géométries permettant aux deux yeux de travailler ensemble¹

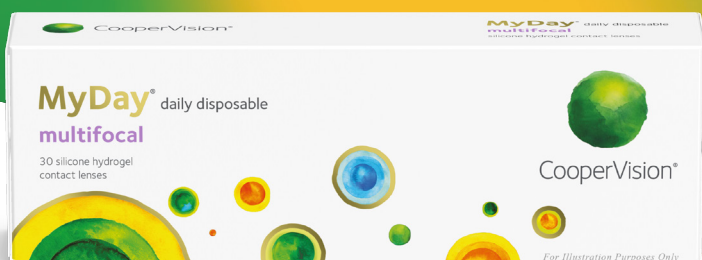

**Facilité et succès
d'adaptation²**



**Vision nette à toutes
les distances^{1,2}**



**Confort
toute la journée¹**

Matériau	Silicone Hydrogel, stenfilcon A avec Aquaform [®] Technology
Dk/e[†]	100 (à -3,00D)
Teneur en eau	54%
Géométrie	Binocular Progressive System [™] <ul style="list-style-type: none">• Add LOW : Asphérique, VP centrale, large zone VL• Add MEDIUM : Asphérique VP centrale, zone VP/VI élargie• Add HIGH : VP centrale sphérique, double zone de VI¹
Épaisseur	0,08 mm (@ -3,00D)
Diamètre Ø_t	14,20 mm
Rayon R_o	8,40 mm
Gamme	-12,00D à +8,00D -10,00D à +8,00D par 0,25 Au-delà par 0,50 Additions : Low (+0,75 à 1,25D) Med (+1,50 à +1,75D) High (+2,00 à +2,50D)
Teinte de manipulation	Oui
Filtre UV[†]	Oui
Conditionnement	Boîtes de 30 et 90
Renouvellement	Journalier
Indication	Presbytie

*(@-3,00DS) x 10⁻⁹ [(cm/sec) x (ml O₂)/(ml x mmHg)] †Attention : Les lentilles de contact absorbant les UV ne peuvent se substituer à un équipement de protection oculaire absorbant les UV tel que les lunettes de protection ou les lunettes de soleil absorbant les UV car elles ne couvrent pas l'intégralité de l'œil et la zone environnante. Les porteurs doivent continuer à utiliser des dispositifs oculaires absorbant les UV conformément aux instructions qui leur ont été données.



MyDay® multifocal


UNE GÉOMÉTRIE DE POINTE¹

Binocular Progressive System™


Système multifocal innovant à 3 additions qui utilise différentes combinaisons de géométries pour optimiser la vision à tous les degrés de presbytie¹

Pour illustration uniquement


Low ADD
asphérique, VP centrale

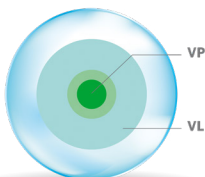

Medium ADD
asphérique, VP centrale

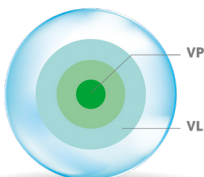

High ADD
VP centrale sphérique, double zone de VL

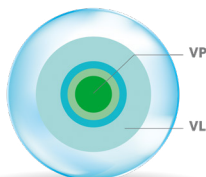

PROTOCOLE EN 3 ÉTAPES

1 RÉFRACTION

- ▶ **Maximum convexe VL**
 - Réfraction du jour : Equivalent sphérique (DVO)
- ▶ **Œil préférentiel VL : méthode du flou réfractif**
 - Œil le plus gêné au passage d'une face +0,75D
- ▶ **Addition minimum VP**
 - Add totale = Add minimum (déchiffrage P2) + 0,75D

2 SÉLECTION DES LENTILLES

ÂGE*	≤ 50 ans	50 à 55 ans	≥ 55 ans
ADD TOTALE	≤ + 1,25D	+1,50 et +1,75D	≥ + 2,00
ŒIL PRÉFÉRENTIEL VL	LOW	LOW	LOW
ŒIL VP	LOW	MÉDIUM	HIGH

3 OPTIMISATIONS

- VL : -0,25D sur l'œil préférentiel de loin
- VP : +0,25D sur l'œil de près

L'expertise au service de la vision.

*Â titre indicatif.

Références :

1. Données internes CVI, 2024. 2. Données internes CVI, 2020. Etude prospective, en double aveugle, bilatérale, sur une semaine avec dispensation avec MyDay® multifocal, n=104 porteurs habituels de lentilles de contact multifocales.

Les lentilles de contact souples MyDay® multifocal (stenfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie, accompagnée de presbytie. Ces lentilles jetables journalières, à usage unique, ne doivent être portées qu'une seule fois et jetées après chaque utilisation. Ne pas dormir avec.

Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice et l'étiquetage. Pour les informations relatives à la sécurité du dispositif, aux réglementations locales, précautions, indications, contre-indications et avertissements, veuillez consulter la notice d'utilisation. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non-contre-indication médicale au port de lentilles et soumis à une prescription médicale. Dispositifs médicaux de classe IIa. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE0123. Fabricant : CooperVision Manufacturing Ltd. Dispositifs médicaux non pris en charge par l'Assurance Maladie excepté si prescription dans les indications suivantes : astigmatisme irrégulier, myopie ≥ 8,00D, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie à 3,00D, kératocône. COOPERVISION SAS au capital de 71 712€ dont le siège social est situé Immeuble Les 2 Arcs bât B - 1800 Route des Crêtes B.P. 273 - 06905 Sophia Antipolis Cedex, France et immatriculée au RCS de Grasse sous le n°39200221800049. Support à destination des professionnels. Octobre 2025. C00-0387-021.

MyDay® et Binocular Progressive System™ sont des marques déposées et des marques commerciales de The Cooper Companies, Inc. et de ses filiales. Images des emballages des produits à des fins d'illustration seulement.

© 2025 CooperVision

MDMFPOS026. Agence Cinquième Etage, 2/4 Bd Jean Jaures, 45000 Orléans. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.



CooperVision®

