

Table de Conversion Sphères Lunettes / Lentilles (Distance Verre/Œil = 12 mm)

Pour une puissance lunettes $\geq \pm 4,00D$, utilisez la table ci-dessous pour sélectionner la puissance équivalente en lentille.

Exemple (encadré orange)

Pour une réfraction ou un équipement lunettes de $-6,75D$, la puissance équivalente lentilles est $-6,25D$. Il est donc recommandé de sélectionner la puissance $-6,00D$ existante dans les gammes Biofinity Energys®, Biofinity® Sphère ou MyDay®.

Sphères - Lunettes	Sphères - Lentilles	Sphères - Gammes: Biofinity Energys® Biofinity® MyDay®	Sphères - Lunettes	Sphères - Lentilles	Sphères - Gamme: Biofinity® XR	Sphères + Lunettes	Sphères + Lentilles	Sphères + Gammes: Biofinity Energys® Biofinity® MyDay®
-4,00	-3,75	-3,75	-14,75	-12,50	-12,50	+4,00	+4,25	+4,25
-4,25	-4,00	-4,00	-15,00	-12,75	-12,50	+4,25	+4,50	+4,50
-4,50	-4,25	-4,25	-15,25	-13,00	-13,00	+4,50	+4,75	+4,75
-4,75	-4,50	-4,50	-15,50	-13,00	-13,00	+4,75	+5,00	+5,00
-5,00	-4,75	-4,75	-15,75	-13,25	-13,00	+5,00	+5,25	+5,25*
-5,25	-5,00	-5,00	-16,00	-13,50	-13,50	+5,25	+5,50	+5,50
-5,50	-5,25	-5,25	-16,25	-13,50	-13,50	+5,50	+6,00	+6,00
-5,75	-5,50	-5,50	-16,50	-13,75	-13,50	+5,75	+6,25	+6,50
-6,00	-5,50	-5,50	-16,75	-14,00	-14,00	+6,00	+6,50	+6,50
-6,25	-5,75	-5,75	-17,00	-14,00	-14,00	+6,25	+6,75	+7,00
-6,50	-6,00	-6,00	-17,25	-14,25	-14,00	+6,50	+7,00	+7,00
-6,75	-6,25	-6,00	-17,50	-14,50	-14,50	+6,75	+7,25	+7,50
-7,00	-6,50	-6,50	-17,75	-14,75	-14,50	+7,00	+7,50	+8,00
-7,25	-6,75	-6,50	-18,00	-14,75	-14,50	+7,25	+8,00	+8,00
-7,50	-7,00	-7,00	-18,25	-15,00	-15,00			
-7,75	-7,00	-7,00	-18,50	-15,25	-15,00	Sphères + Lunettes	Sphères + Lentilles	Sphères + Gamme: Biofinity® XR
-8,00	-7,25	-7,00	-18,75	-15,25	-15,00	+7,50	+8,25	+8,50
-8,25	-7,50	-7,50	-19,00	-15,50	-15,50	+7,75	+8,50	+8,50
-8,50	-7,75	-7,50	-19,25	-15,75	-15,50	+8,00	+8,75	+9,00
-8,75	-8,00	-8,00	-19,50	-15,75	-15,50	+8,25	+9,25	+9,50
-9,00	-8,00	-8,00	-19,75	-16,00	-16,00	+8,50	+9,50	+9,50
-9,25	-8,25	-8,00	-20,00	-16,25	-16,00	+8,75	+9,75	+10,00
-9,50	-8,50	-8,50	-20,25	-16,25	-16,00	+9,00	+10,00	+10,00
-9,75	-8,75	-8,50	-20,50	-16,50	-16,50	+9,25	+10,50	+10,50
-10,00	-9,00	-9,00	-20,75	-16,50	-16,50	+9,50	+10,75	+11,00
-10,25	-9,25	-9,00	-21,00	-16,75	-16,50	+9,75	+11,00	+11,00
-10,50	-9,25	-9,00	-21,25	-17,00	-17,00	+10,00	+11,25	+11,50
-10,75	-9,50	-9,50	-21,50	-17,00	-17,00	+10,25	+11,75	+12,00
-11,00	-9,75	-9,50	-21,75	-17,25	-17,00	+10,50	+12,00	+12,00
-11,25	-10,00	-10,00	-22,00	-17,50	-17,50	+10,75	+12,25	+12,50
-11,50	-10,00	-10,00	-22,25	-17,50	-17,50	+11,00	+12,75	+13,00
-11,75	-10,25	-10,00	-22,50	-17,75	-17,50	+11,25	+13,00	+13,00
-12,00	-10,50	-10,50	-22,75	-17,75	-17,50	+11,50	+13,25	+13,50
-12,25	-10,75	-10,50	-23,00	-18,00	-18,00	+11,75	+13,75	+14,00
-12,50	-10,75	-10,50	-23,25	-18,25	-18,00	+12,00	+14,00	+14,00
-12,75	-11,00	-11,00	-23,50	-18,25	-18,00	+12,25	+14,25	+14,50
-13,00	-11,25	-11,00	-23,75	-18,50	-18,50	+12,50	+14,75	+15,00
-13,25	-11,50	-11,50	-24,00	-18,75	-18,50	+12,75	+15,00	+15,00
-13,50	-11,50	-11,50	-24,25	-18,75	-18,50			
-13,75	-11,75	-11,50	-24,50	-19,00	-19,00	Sphères + Lunettes	Sphères + Lentilles	Sphères + Gamme: Proclear®
-14,00	-12,00	-12,00	-24,75	-19,00	-19,00	+13,00	+15,50	+15,50
-14,25	-12,25	-12,00	-25,00	-19,25	-19,00	+13,25	+15,75	+16,00
-14,50	-12,25	-12,00	-25,25	-19,50	-19,50	+13,50	+16,00	+16,00
			-25,50	-19,50	-19,50	+13,75	+16,50	+16,50
			-25,75	-19,75	-19,50	+14,00	+16,75	+17,00
			-26,00	-19,75	-19,50	+14,25	+17,25	+17,50
			-26,25	-20,00	-20,00	+14,50	+17,50	+17,50
			-26,50	-20,00	-20,00	+14,75	+18,00	+18,00
						+15,00	+18,25	+18,50
						+15,25	+18,75	+19,00
						+15,50	+19,00	+19,00
						+15,75	+19,50	+19,50
						+16,00	+19,75	+20,00

* +5,50 en MyDay®

Pour plus d'informations
COOPERVISION S.A.S. - Immeuble "les deux Arcs"
Bât. A & B - 1800 route des Crêtes BP 273
06905 SOPHIA-ANTIPOLIS Cedex

N° Vert 0 800 08 36 67 N° Vert FAX 0 800 08 62 63
APPEL GRATUIT APPEL GRATUIT

www.coopervision.fr

MyDay®, Biofinity®, Biofinity Energys®, Proclear® et OptiExpert® sont des marques déposées de The Cooper Companies, Inc. et de ses filiales. © 2024 CooperVision



Gamme de lentilles jetables journalières : Les lentilles de contact souples MyDay® (stenfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie. Les lentilles de contact souples MyDay® toric (stenfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie, accompagnée d'astigmatisme. Ces lentilles jetables journalières, à usage unique, ne doivent être portées qu'une seule fois et jetées après chaque utilisation. Ne pas dormir avec.

Gamme de lentilles mensuelles : Les lentilles de contact souples Biofinity® (comfilcon A), Biofinity® XR (comfilcon A), Biofinity Energys® (comfilcon A) et Proclear® (omafilcon B) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie. Les lentilles de contact souples Biofinity® toric (comfilcon A) et Biofinity® XR toric (comfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie, accompagnée d'astigmatisme. Ces lentilles jetables mensuelles sont à usage journalier, nécessitent un entretien adapté à la fin de la journée et doivent être jetées 1 mois après le début de l'utilisation. Pour la gamme Biofinity® (comfilcon A) : Ces lentilles peuvent être portées de façon prolongée (jusqu'à 6 nuits/7 jours d'affilée) uniquement sur avis médical.

Veillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice et l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, contre-indications et avertissements, veuillez consulter la notice. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non-contre-indication médicale au port de lentilles et soumis à une prescription médicale. Dispositifs médicaux de classe IIa. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE0123.

Fabricant : CooperVision Manufacturing Ltd.
Dispositifs médicaux non pris en charge par l'Assurance Maladie excepté si prescription dans les indications suivantes : astigmatisme irrégulier, myopie $\geq 8,00D$, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie $\geq 3,00D$, kératocône.
COOPERVISION SAS au capital de 71 712€ dont le siège social est situé Immeuble Les 2 Arcs bât B - 1800 Route des Crêtes B.P. 273 - 06905 Sophia Antipolis Cedex, France et immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 39200221800049.
Janvier 2024 - Support à destination des professionnels - COO-0298-001
Imprimerie Bosshard, 06250 Mougins - Ne pas jeter sur la voie publique


GUIDEDV02024




CooperVision®

Aider le plus grand nombre à mieux voir chaque jour

Vous simplifier le choix de la première lentille

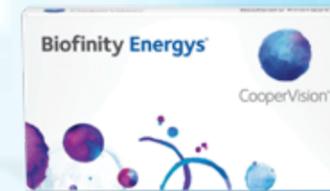

Guide de sélection lentilles tenant compte de la Distance Verre/Œil

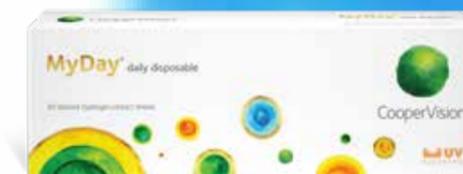

Découvrez également OptiExpert® qui calcule pour vous les paramètres et vous propose des lentilles de la gamme CooperVision® adaptées à votre porteur

Téléchargez dès à présent OptiExpert® Ou rendez-vous sur www.coopervision.fr/outils-et-calculatrices

Disponible gratuitement sur l'Apple Store et Google Play pour iPhone, iPad et tablettes ou mobiles Android. Egalement disponible sur le site coopervision.fr

Formules converties Sphères et Cylindres Lunettes / Lentilles : HYPERMÉTROPES

Sélectionner la sphère lunettes puis le cylindre lunettes. La case à l'intersection des 2 colonnes indique la sphère et la couleur de cette case indique le cylindre de la lentille à commander :

SPHÉRIQUES

Lentilles sphériques

**Biofinity Energys®
Biofinity®/XR
MyDay®**

TORQUES

Les paramètres indiqués dans les cases avec une police noire et en gras sont disponibles en Biofinity® toric ET MyDay® toric

Formules converties Sphères et Cylindres Lunettes / Lentilles : MYOPES

Cylindres à commander :
Biofinity® toric et/ou MyDay® toric

Cylindre -0,75

Cylindre -1,75

Cylindre -1,25

Cylindre -2,25

Biofinity® XR toric
(Sph. : +8.50 à +20.00D et -10.50 à -20.00D par 0.50D ;
Cyl. : -0.75 à -5.75
Sph. : -10.00 à +8.00D par 0.50D après +/- 6.00D ;
Cyl. : -2.75 à -5.75)

Sphères Lunettes	Cylindres Lunettes									
	(-0,50)	(-0,75)	(-1,00)	(-1,25)	(-1,50)	(-1,75)	(-2,00)	(-2,25)	(-2,50)	
+0,25		+0,25	Plan	+0,25	Plan	+0,25	Plan	+0,25	Plan	
+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	
+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	
+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	
+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	
+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	
+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	
+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	
+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	
+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	
+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	
+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	
+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	
+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	
+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	
+4,00	+4,25	+4,00	+4,25	+4,00	+4,25	+4,00	+4,25	+4,00	+4,25 (-2,75)	
+4,25	+4,50	+4,25	+4,50	+4,25	+4,50	+4,25	+4,50	+4,25	+4,50 (-2,75)	
+4,50	+4,50	+4,50	+4,75	+4,50	+4,75	+4,50	+4,75	+4,50	+4,75 (-2,75)	
+4,75	+4,75	+5,00	+5,00	+4,75	+5,00	+4,75	+5,00	+4,75	+5,00 (-2,75)	
+5,00	+5,00	+5,25	+5,00	+5,00	+5,25	+5,00	+5,25	+5,00	+5,25 (-2,75)	
+5,25	+5,25	+5,50	+5,25	+5,50	+5,25	+5,50	+5,25	+5,50	+5,25 (-2,75)	
+5,50	+6,00	+5,75	+6,00	+5,75	+6,00	+6,00	+5,75	+6,00 (-2,75)	+5,75 (-2,75)	
+5,75	+6,50	+6,00	+6,50	+6,00	+6,50	+6,00	+6,50	+6,00 (-2,75)	+6,00 (-2,75)	
+6,00	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50 (-2,75)	+6,50 (-2,75)	
+6,25	+6,50	+7,00	+7,00	+6,50	+7,00	+6,50	+7,00	+6,50	+6,50 (-2,75)	
+6,50	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00 (-2,75)	
+6,75	+7,00	+7,50	+7,00	+7,50	+7,50	+7,00	+7,50	+7,00	+7,50 (-2,75)	
+7,00	+7,75	+7,50	+8,00	+7,50	+8,00	+8,00	+7,50	+8,00 (-2,75)	+7,50 (-2,75)	
+7,25	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00 (-2,75)	+8,00 (-2,75)	
+7,50	+8,00	+8,00	+8,50 (-1,25)	+8,00	+8,50 (-1,75)	+8,00	+8,50 (-2,25)	+8,50 (-2,75)	+8,00 (-2,75)	
+7,75	+8,50*	+8,50 (-0,75)	+8,50 (-1,25)	+8,50 (-1,25)	+8,50 (-1,75)	+8,50 (-1,75)	+8,50 (-2,25)	+8,50 (-2,25)	+8,50 (-2,75)	

Exemple 1 (encadré orange)

Correction Lunettes : +4,50 (-1,50)
 Correction Lentilles : +4,75 (-1,75)
 La lentille Biofinity® toric ou MyDay® toric à commander est donc : **+4,75 (-1,75)**

Exemple 2

Pour une correction lunettes de +1,25 (-0,50), la correction lentille à sélectionner est +1,00. La case est blanche donc sans cylindre : commander la lentille Biofinity® sphérique ou MyDay® +1,00D pour ce porteur.

ASTUCE

Pour un axe lunettes hors gamme lentilles, utilisez la règle des « GADS »
Gauche Ajoute, Droit Soustrait.

Exemple : pour une correction lunettes +4,50 (-1,50) 15°, 15° n'existant pas dans la gamme d'axe lentilles :

- ajouter 5° pour l'OG : axe Biofinity® toric ou MyDay® toric à 20°,
- et soustraire 5° pour l'OD : axe Biofinity® toric ou MyDay® toric à 10°.

ŒIL DROIT : SOUSTRAIRE 5°

ŒIL GAUCHE : AJOUTER 5°

■ Paupière
■ Larmes
■ Rotation induite de la lentille

Sphères Lunettes	Cylindres Lunettes										
	(-0,50)	(-0,75)	(-1,00)	(-1,25)	(-1,50)	(-1,75)	(-2,00)	(-2,25)	(-2,50)	(-2,75)	(-3,00)
Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan (-2,75)	-0,25 (-2,75)
-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25	-0,50 (-2,75)
-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75 (-2,75)
-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00 (-2,75)
-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25 (-2,75)
-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50 (-2,75)
-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75 (-2,75)
-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75	-2,00 (-2,75)
-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25 (-2,75)
-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,50 (-2,75)
-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50	-2,75 (-2,75)
-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75	-3,00 (-2,75)
-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00	-3,25
-3,25	-3,50	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25
-3,50	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50
-3,75	-3,50	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75
-4,00	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00 (-2,75)
-4,25	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25 (-2,75)
-4,50	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50 (-2,75)
-4,75	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75
-5,00	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75	-5,00
-5,25	-5,25	-5,25	-5,00	-5,25	-5,00	-5,25	-5,00	-5,25	-5,00	-5,25	-5,25
-5,50	-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,50
-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,75
-6,00	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75
-6,25	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00
-6,50	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
-6,75	-6,50	-6,00	-6,00	-6,50	-6,00	-6,50	-6,00	-6,50	-6,00	-6,50	-6,50
-7,00	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50
-7,25	-6,50	-7,00	-6,50	-7,00	-6,50	-7,00	-6,50	-7,00	-6,50	-7,00	-7,00
-7,50	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
-7,75	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
-8,00	-7,50	-7,00	-7,00	-7,50	-7,00	-7,50	-7,00	-7,50	-7,00	-7,50	-7,50
-8,25	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50
-8,50	-7,50	-8,00	-7,50	-8,00	-7,50	-8,00	-7,50	-8,00	-7,50	-8,00	-8,00
-8,75	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
-9,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
-9,25	-8,50	-8,00	-8,50	-8,00	-8,50	-8,00	-8,50	-8,00	-8,50	-8,00	-8,50
-9,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50
-9,75	-9,00	-9,00	-8,50	-9,00	-8,50	-9,00	-8,50	-9,00	-8,50	-9,00	-9,00
-10,00	-9,00	-10,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
-10,25	-9,00	-9,50	-9,00	-9,50	-9,00	-9,50	-9,00	-9,50	-9,00	-9,50	-9,50
-10,50	-9,50	-9,00	-9,00	-9,50	-9,00	-9,50	-9,00	-9,50	-9,00	-9,50	-9,50
-10,75	-9,50	-9,50	-9,50	-9,50	-9,50	-9,50	-9,50	-9,50	-9,50	-9,50	-9,50
-11,00	-9,50	-10,00	-9,50	-10,00	-9,50	-10,00	-9,50	-10,00	-9,50	-10,00	-10,00
-11,25	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
-11,50	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
-11,75	-10,50	-10,50	-10,00	-10,50 (-0,75)	-10,00	-10,50	-10,00	-10,50 (-1,25)	-10,00	-10,50 (-1,75)	-10,50 (-1,75)

Encore plus d'équipements disponibles dans la gamme Biofinity® XR

Contactez votre service clients pour définir les puissances à commander :

04 92 96 62 62 ou N° Vert 0 800 08 36 67

APPEL GRATUIT