

Vous simplifier le choix de la première lentille

GUIDE DE SÉLECTION LENTILLES

tenant compte de la Distance Verre/Œil



Utilisez également OptiExpert® qui calcule les paramètres et vous propose des lentilles de la gamme CooperVision® adaptées à votre porteur*

Téléchargez OptiExpert®

Ou rendez-vous sur www.coopervision.fr/outils-et-calculatrices



*OptiExpert® est un outil d'éducation, de référence et d'information pour les professionnels de la vue qui peuvent choisir d'utiliser l'application dans le cadre de leur propre évaluation des patients, mais il n'est pas destiné à être utilisé pour la prise de décision clinique. OptiExpert® n'est pas destiné à constituer et ne constitue pas un avis médical ou optométrique, et n'est pas non plus destiné à remplacer l'évaluation du patient réalisée par un professionnel de la vue.



Formules converties Sphères et Cylindres Lunettes / Lentilles HYPERMÉTROPES

Sélectionner la sphère lunettes puis le cylindre lunettes. La case à l'intersection des 2 colonnes indique la sphère et la couleur de cette case indique le cylindre de la lentille à commander :

SPHÉRIQUES

Lentilles sphériques

Biofinity Energys®
Biofinity®/XR
MyDay®

TORIQUES

Lentilles toriques

Les paramètres indiqués dans les cases avec une police noire et en gras sont disponibles en Biofinity® toric et MyDay® toric

Cylindres Lunettes	(-0,50)	(-0,75)	(-1,00)	(-1,25)	(-1,50)	(-1,75)	(-2,00)	(-2,25)	(-2,50)	...
Sphères Lunettes										
+0,25		+0,25	Plan	+0,25	Plan	+0,25	Plan	+0,25	Plan	
+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	
+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	
+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	
+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	
+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	
+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	
+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	
+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	
+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	
+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	
+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	
+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	
+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	
+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	
+4,00	+4,25	+4,00	+4,25	+4,00	+4,25	+4,00	+4,25	+4,00	+4,25 (-2,75)	
+4,25	+4,50	+4,25	+4,50	+4,25	+4,50	+4,25	+4,50	+4,25	+4,50 (-2,75)	
+4,50	+4,50	+4,50	+4,75	+4,50	+4,75	+4,50	+4,75	+4,50	+4,75 (-2,75)	
+4,75	+4,75	+5,00	+5,00	+4,75	+5,00	+4,75	+5,00	+4,75	+5,00 (-2,75)	
+5,00	+5,00	+5,25	+5,00	+5,00	+5,25	+5,00	+5,25	+5,00	+5,25 (-2,75)	
+5,25	+5,25	+5,50	+5,25	+5,50	+5,25	+5,50	+5,25	+5,50	+5,25 (-2,75)	
+5,50	+6,00	+5,75	+6,00	+5,75	+6,00	+5,75	+6,00	+5,75	+6,00 (-2,75)	
+5,75	+6,50	+6,00	+6,50	+6,00	+6,50	+6,00	+6,50	+6,00	+6,50 (-2,75)	
+6,00	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50 (-2,75)	
+6,25	+6,50	+7,00	+7,00	+6,50	+7,00	+6,50	+7,00	+6,50	+7,00 (-2,75)	
+6,50	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00 (-2,75)	
+6,75	+7,00	+7,50	+7,00	+7,50	+7,50	+7,00	+7,50	+7,00	+7,50 (-2,75)	
+7,00	+7,75	+7,50	+8,00	+7,50	+8,00	+8,00	+7,50	+8,00	+7,50 (-2,75)	
+7,25	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00 (-2,75)	
+7,50	+8,00	+8,00	+8,50 (-1,25)	+8,00	+8,50 (-1,75)	+8,00	+8,50 (-2,25)	+8,50 (-2,75)	+8,00 (-2,75)	
+7,75	+8,50	+8,50 (-0,75)	+8,50 (-1,25)	+8,50 (-1,25)	+8,50 (-1,75)	+8,50 (-1,75)	+8,50 (-2,25)	+8,50 (-2,25)	+8,50 (-2,75)	

Exemple 1 (encadré orange)

Correction Lunettes : +4,50 (-1,50)

Correction Lentilles : +4,75 (-1,75)

La lentille Biofinity® toric ou MyDay® toric à commander est donc : **+4,75 (-1,75)**

Exemple 2

Pour une correction lunettes de +1,25 (-0,50), la correction lentille à sélectionner est **+1,00**.

La case est blanche donc sans cylindre : commander la lentille Biofinity® sphérique ou MyDay® **+1,00D** pour ce porteur.

ASTUCE

Pour un axe lunettes hors gamme lentilles, utilisez la règle des « **GADS** » **G**auche **A**joute, **D**roit **S**oustrait

Exemple :

Pour une correction lunettes +4,50 (-1,50) 15°, 15° n'existant pas dans la gamme d'axe lentilles :

- Ajouter 5° pour l'OG : axe Biofinity® toric ou MyDay® toric à **20°**,
- Et soustraire 5° pour l'OD : axe Biofinity® toric ou MyDay® toric à **10°**.

OIL DROIT : SOUSTRAIRE 5°

OIL GAUCHE : AJOUTER 5°



Formules converties Sphères et Cylindres Lunettes / Lentilles MYOPES

Cylindres à commander :

Biofinity® toric et/ou MyDay® toric

- Cylindre -0,75
- Cylindre -1,25
- Cylindre -1,75
- Cylindre -2,25

Biofinity® XR toric

Sph. : +8,50 à +20,00D et -10,50 à -20,00D par 0,50D
Cyl. : -0,75 à -5,75

Sph. : -10,00 à +8,00D par 0,50D après +/- 6,00D
Cyl. : -2,75 à -5,75

Cylindres Lunettes	(-0,50)	(-0,75)	(-1,00)	(-1,25)	(-1,50)	(-1,75)	(-2,00)	(-2,25)	(-2,50)	(-2,75)	(-3,00)	...
Sphères Lunettes												
Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan (-2,75)	-0,25 (-2,75)	
-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25 (-2,75)	-0,50 (-2,75)	
-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50 (-2,75)	-0,75 (-2,75)	
-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75 (-2,75)	-1,00 (-2,75)	
-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00 (-2,75)	-1,25 (-2,75)	
-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25 (-2,75)	-1,50 (-2,75)	
-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50 (-2,75)	-1,75 (-2,75)	
-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75 (-2,75)	-2,00 (-2,75)	
-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00 (-2,75)	-2,25 (-2,75)	
-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25 (-2,75)	-2,50 (-2,75)	
-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50 (-2,75)	-2,75 (-2,75)	
-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75 (-2,75)	-3,00 (-2,75)	
-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00 (-2,75)	-3,25 (-2,75)	
-3,25	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25 (-2,75)	-3,50 (-2,75)	
-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50 (-2,75)	-3,75 (-2,75)	
-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75 (-2,75)	-4,00 (-2,75)	
-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00 (-2,75)	-4,25 (-2,75)	
-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25 (-2,75)	-4,50 (-2,75)	
-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50 (-2,75)	-4,75 (-2,75)	
-4,75	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75 (-2,75)	-5,00 (-2,75)	
-5,00	-5,25	-5,00	-5,25	-5,00	-5,25	-5,00	-5,25	-5,00	-5,25	-5,00 (-2,75)	-5,25 (-2,75)	
-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25 (-2,75)	-5,50 (-2,75)	
-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50 (-2,75)	-5,75 (-2,75)	
-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75 (-2,75)	-6,00 (-2,75)	
-6,00	-6,25	-6,00	-6,25	-6,00	-6,25	-6,00	-6,25	-6,00	-6,25	-6,00 (-2,75)	-6,25 (-2,75)	
-6,25	-6,50	-6,25	-6,50	-6,25	-6,50	-6,25	-6,50	-6,25	-6,50	-6,25 (-2,75)	-6,50 (-2,75)	
-6,50	-6,75	-6,50	-6,75	-6,50	-6,75	-6,50	-6,75	-6,50	-6,75	-6,50 (-2,75)	-6,75 (-2,75)	
-6,75	-7,00	-6,75	-7,00	-6,75	-7,00	-6,75	-7,00	-6,75	-7,00	-6,75 (-2,75)	-7,00 (-2,75)	
-7,00	-7,25	-7,00	-7,25	-7,00	-7,25	-7,00	-7,25	-7,00	-7,25	-7,00 (-2,75)	-7,25 (-2,75)	
-7,25	-7,50	-7,25	-7,50	-7,25	-7,50	-7,25	-7,50	-7,25	-7,50	-7,25 (-2,75)	-7,50 (-2,75)	
-7,50	-7,75	-7,50	-7,75	-7,50	-7,75	-7,50	-7,75	-7,50	-7,75	-7,50 (-2,75)	-7,75 (-2,75)	
-7,75	-8,00	-7,75	-8,00	-7,75	-8,00	-7,75	-8,00	-7,75	-8,00	-7,75 (-2,75)	-8,00 (-2,75)	
-8,00	-8,25	-8,00	-8,25	-8,00	-8,25	-8,00	-8,25	-8,00	-8,25	-8,00 (-2,75)	-8,25 (-2,75)	
-8,25	-8,50	-8,25	-8,50	-8,25	-8,50	-8,25	-8,50	-8,25	-8,50	-8,25 (-2,75)	-8,50 (-2,75)	
-8,50	-8,75	-8,50	-8,75	-8,50	-8,75	-8,50	-8,75	-8,50	-8,75	-8,50 (-2,75)	-8,75 (-2,75)	
-8,75	-9,00	-8,75	-9,00	-8,75	-9,00	-8,75	-9,00	-8,75	-9,00	-8,75 (-2,75)	-9,00 (-2,75)	
-9,00	-9,25	-9,00	-9,25	-9,00	-9,25	-9,00	-9,25	-9,00	-9,25	-9,00 (-2,75)	-9,25 (-2,75)	
-9,25	-9,50	-9,25	-9,50	-9,25	-9,50	-9,25	-9,50	-9,25	-9,50	-9,25 (-2,75)	-9,50 (-2,75)	
-9,50	-9,75	-9,50	-9,75	-9,50	-9,75	-9,50	-9,75	-9,50	-9,75	-9,50 (-2,75)	-9,75 (-2,75)	
-9,75	-10,00	-9,75	-10,00	-9,75	-10,00	-9,75	-10,00	-9,75	-10,00	-9,75 (-2,75)	-10,00 (-2,75)	
-10,00	-10,25	-10,00	-10,25	-10,00	-10,25	-10,00	-10,25	-10,00	-10,25	-10,00 (-2,75)	-10,25 (-2,75)	
-10,25	-10,50	-10,25	-10,50	-10,25	-10,50	-10,25	-10,50	-10,25	-10,50	-10,25 (-2,75)	-10,50 (-2,75)	
-10,50	-10,75	-10,50	-10,75	-10,50	-10,75	-10,50	-10,75	-10,50	-10,75	-10,50 (-2,75)	-10,75 (-2,75)	
-10,75	-11,00	-10,75	-11,00	-10,75	-11,00	-10,75	-11,00	-10,75	-11,00	-10,75 (-2,75)	-11,00 (-2,75)	
-11,00	-11,25	-11,00	-11,25	-11,00	-11,25	-11,00	-11,25	-11,00	-11,25	-11,00 (-2,75)	-11,25 (-2,75)	
-11,25	-11,50	-11,25	-11,50	-11,25	-11,50	-11,25	-11,50	-11,25	-11,50	-11,25 (-2,75)	-11,50 (-2,75)	
-11,50	-11,75	-11,50	-11,75	-11,50	-11,75	-11,50	-11,75	-11,50	-11,75	-11,50 (-2,75)	-11,75 (-2,75)	
-11,75	-12,00	-11,75	-12,00	-11,75	-12,00	-11,75	-12,00	-11,75	-12,00	-11,75 (-2,75)	-12,00 (-2,75)	

Encore plus d'équipements disponibles dans la gamme Biofinity® XR

Contactez votre service client pour définir les puissances à commander : 04 92 96 62 62 ou

0 800 083 667

Service & appel
gratuits

TABLE DE CONVERSION SPHÈRES LUNETTES / LENTILLES

(Distance Verre/Oeil = 12 mm)

Pour une puissance lunettes $\geq \pm 4,00D$,
utilisez la table ci-dessous pour sélectionner la puissance équivalente en lentille.

Exemple (encadré orange) : Pour une réfraction ou un équipement lunettes de $-6,75D$, la puissance équivalente lentilles est $-6,25D$.
Il est donc recommandé de sélectionner la puissance $-6,00D$ existante dans les gammes Biofinity Energys®, Biofinity® ou MyDay®.

Sphères - Lunettes	Sphères - Lentilles	Sphères - Gammes : Biofinity Energys® Biofinity® MyDay®
-4,00	-3,75	-3,75
-4,25	-4,00	-4,00
-4,50	-4,25	-4,25
-4,75	-4,50	-4,50
-5,00	-4,75	-4,75
-5,25	-5,00	-5,00
-5,50	-5,25	-5,25
-5,75	-5,50	-5,50
-6,00	-5,50	-5,50
-6,25	-5,75	-5,75
-6,50	-6,00	-6,00
-6,75	-6,25	-6,00
-7,00	-6,50	-6,50
-7,25	-6,75	-6,50
-7,50	-7,00	-7,00
-7,75	-7,00	-7,00
-8,00	-7,25	-7,00
-8,25	-7,50	-7,50
-8,50	-7,75	-7,50
-8,75	-8,00	-8,00
-9,00	-8,00	-8,00
-9,25	-8,25	-8,00
-9,50	-8,50	-8,50
-9,75	-8,75	-8,50
-10,00	-9,00	-9,00
-10,25	-9,25	-9,00
-10,50	-9,25	-9,00
-10,75	-9,50	-9,50
-11,00	-9,75	-9,50
-11,25	-10,00	-10,00
-11,50	-10,00	-10,00
-11,75	-10,25	-10,00
-12,00	-10,50	-10,50
-12,25	-10,75	-10,50
-12,50	-10,75	-10,50
-12,75	-11,00	-11,00
-13,00	-11,25	-11,00
-13,25	-11,50	-11,50
-13,50	-11,50	-11,50
-13,75	-11,75	-11,50
-14,00	-12,00	-12,00
-14,25	-12,25	-12,00
-14,50	-12,25	-12,00

Sphères - Lunettes	Sphères - Lentilles	Sphères - Gammes : Biofinity® XR
-14,75	-12,50	-12,50
-15,00	-12,75	-12,50
-15,25	-13,00	-13,00
-15,50	-13,00	-13,00
-15,75	-13,25	-13,00
-16,00	-13,50	-13,50
-16,25	-13,50	-13,50
-16,50	-13,75	-13,50
-16,75	-14,00	-14,00
-17,00	-14,00	-14,00
-17,25	-14,25	-14,00
-17,50	-14,50	-14,50
-17,75	-14,75	-14,50
-18,00	-14,75	-14,50
-18,25	-15,00	-15,00
-18,50	-15,25	-15,00
-18,75	-15,25	-15,00
-19,00	-15,50	-15,50
-19,25	-15,75	-15,50
-19,50	-15,75	-15,50
-19,75	-16,00	-16,00
-20,00	-16,25	-16,00
-20,25	-16,25	-16,00
-20,50	-16,50	-16,50
-20,75	-16,50	-16,50
-21,00	-16,75	-16,50
-21,25	-17,00	-17,00
-21,50	-17,00	-17,00
-21,75	-17,25	-17,00
-22,00	-17,50	-17,50
-22,25	-17,50	-17,50
-22,50	-17,75	-17,50
-22,75	-17,75	-17,50
-23,00	-18,00	-18,00
-23,25	-18,25	-18,00
-23,50	-18,25	-18,00
-23,75	-18,50	-18,50
-24,00	-18,75	-18,50
-24,25	-18,75	-18,50
-24,50	-19,00	-19,00
-24,75	-19,00	-19,00
-25,00	-19,25	-19,00
-25,25	-19,50	-19,50
-25,50	-19,50	-19,50
-25,75	-19,75	-19,50
-26,00	-19,75	-19,50
-26,25	-20,00	-20,00
-26,50	-20,00	-20,00

Sphères + Lunettes	Sphères + Lentilles	Sphères + Gamme : Biofinity Energys® Biofinity® MyDay®
+4,00	+4,25	+4,25
+4,25	+4,50	+4,50
+4,50	+4,75	+4,75
+4,75	+5,00	+5,00
+5,00	+5,25	+5,25*
+5,25	+5,50	+5,50
+5,50	+6,00	+6,00
+5,75	+6,25	+6,50
+6,00	+6,50	+6,50
+6,25	+6,75	+7,00
+6,50	+7,00	+7,00
+6,75	+7,25	+7,50
+7,00	+7,75	+8,00
+7,25	+8,00	+8,00

Sphères + Lunettes	Sphères + Lentilles	Sphères + Gamme : Biofinity® XR
+7,50	+8,25	+8,50
+7,75	+8,50	+8,50
+8,00	+8,75	+9,00
+8,25	+9,25	+9,50
+8,50	+9,50	+9,50
+8,75	+9,75	+10,00
+9,00	+10,00	+10,00
+9,25	+10,50	+10,50
+9,50	+10,75	+11,00
+9,75	+11,00	+11,00
+10,00	+11,25	+11,50
+10,25	+11,75	+12,00
+10,50	+12,00	+12,00
+10,75	+12,25	+12,50
+11,00	+12,75	+13,00
+11,25	+13,00	+13,00
+11,50	+13,25	+13,50
+11,75	+13,75	+14,00
+12,00	+14,00	+14,00
+12,25	+14,25	+14,50
+12,50	+14,75	+15,00
+12,75	+15,00	+15,00

Sphères + Lunettes	Sphères + Lentilles	Sphères + Gamme : Proclear®
+13,00	+15,50	+15,50
+13,25	+15,75	+16,00
+13,50	+16,00	+16,00
+13,75	+16,50	+16,50
+14,00	+16,75	+17,00
+14,25	+17,25	+17,50
+14,50	+17,50	+17,50
+14,75	+18,00	+18,00
+15,00	+18,25	+18,50
+15,25	+18,75	+19,00
+15,50	+19,00	+19,00
+15,75	+19,50	+19,50
+16,00	+19,75	+20,00

Pour plus d'informations,
contactez le service client
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30

Par tél. : 04 92 96 62 62 ou

0 800 083 667

Service & appel
gratuits

* +5.50 en MyDay®

Les lentilles de contact souples MyDay® (stenfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie. Les lentilles de contact souples MyDay® toric (stenfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie, accompagnée d'astigmatisme. Ces lentilles jetables journalières, à usage unique, ne doivent être portées qu'une seule fois et jetées après chaque utilisation. Ne pas dormir avec.

Les lentilles de contact souples Biofinity® (comfilcon A), Biofinity® XR (comfilcon A), Biofinity Energys® (comfilcon A) et Proclear® (omafilcon B) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie. Les lentilles de contact souples Biofinity® toric (comfilcon A) et Biofinity® XR toric (comfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie, accompagnée d'astigmatisme. Ces lentilles jetables mensuelles sont à usage journalier, nécessitent un entretien adapté à la fin de la journée et doivent être jetées 1 mois après le début de l'utilisation. Pour la gamme Biofinity® (comfilcon A) : Ces lentilles peuvent également être utilisées en port prolongé jusqu'à 6 nuits/7 jours uniquement sur avis médical.

Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice et l'étiquetage. Pour les informations relatives à la sécurité du dispositif, aux réglementations locales, précautions, indications, contre-indications et avertissements, veuillez consulter la notice d'utilisation. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non-contre-indication médicale au port de lentilles et soumis à une prescription médicale. Dispositifs médicaux de classe IIa. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE0123. Fabricant : CooperVision Manufacturing Ltd. Dispositifs médicaux non pris en charge par l'Assurance Maladie excepté si prescription dans les indications suivantes : astigmatisme irrégulier, myopie $\geq 8,00D$, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie à $3,00D$, kératocône. COOPERVISION SAS au capital de 71 712€ dont le siège social est situé Immeuble Les 2 Arcs bât B - 1800 Route des Crêtes B.P. 273 - 06905 Sophia Antipolis Cedex, France et immatriculée au RCS de Grasse sous le n°39200221800049. Janvier 2026. Support à destination des professionnels. GUIDÉV026.

MyDay®, Biofinity®, Biofinity Energys®, Proclear®, et OptiExpert® sont des marques déposées de The Cooper Companies, Inc. et de ses filiales. Images des emballages des produits à des fins d'illustration seulement.

© 2026 CooperVision

Agence Cinquième étage, 2/4 Bd Jean Jaurès, 45000 Orléans. Ne pas jeter sur la voie publique.

