


Sélectionner
Biofinity® et Biofinity® toric
en tenant compte de la
distance verre/œil

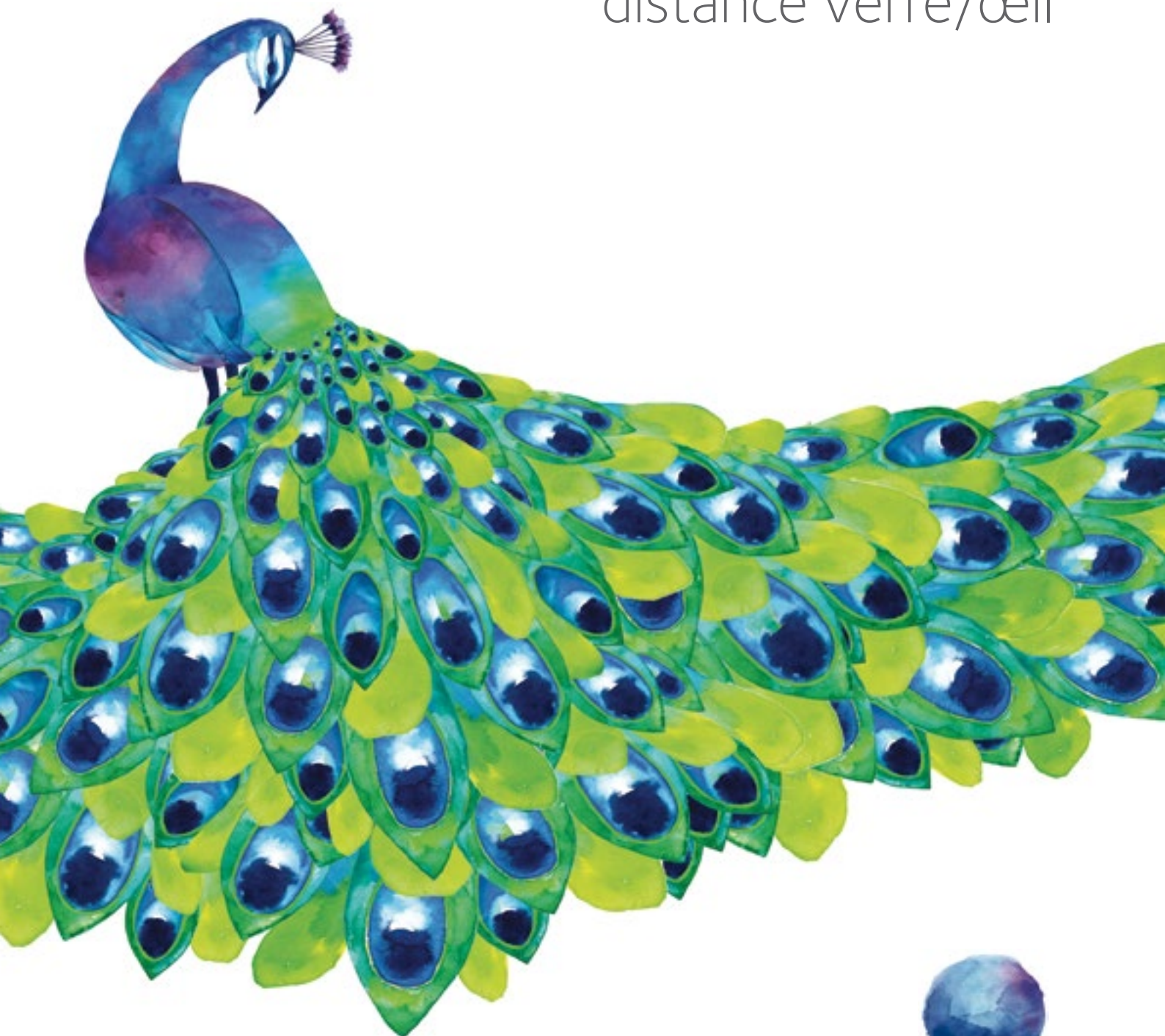

CooperVision™

Formules converties Sphères et Cylindres Lunettes/Lentilles pour HYPERMÉTROPIES

Sélectionner la sphère lunettes puis le cylindre lunettes. La case à l'intersection des 2 colonnes indique la sphère et la couleur de cette case indique le cylindre de la lentille à commander :

 Biofinity® sphérique	 Cylindre Biofinity® toric (-1,25)	 Cylindre Biofinity® toric (-2,25)
 Cylindre Biofinity® toric (-0,75)	 Cylindre Biofinity® toric (-1,75)	 Proclear® toric XR (Sph : -10 à +10 ; Cyl : -2,75 à -5,75)

Sphères Lunettes	Cylindres Lunettes									
	(-0,50)	(-0,75)	(-1,00)	(-1,25)	(-1,50)	(-1,75)	(-2,00)	(-2,25)	(-2,50)	
+0,25		+0,25	Plan	+0,25	Plan	+0,25	Plan	+0,25	Plan	
+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	+0,50	+0,25	
+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	+0,75	+0,50	
+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	+1,00	+0,75	
+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	+1,25	+1,00	
+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	+1,50	+1,25	
+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	+1,75	+1,50	
+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	+2,00	+1,75	
+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	+2,25	+2,00	
+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	+2,50	+2,25	
+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	+2,75	+2,50	
+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	+3,00	+2,75	
+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	+3,25	+3,00	
+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	+3,50	+3,25	
+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	+3,75	+3,50	
+4,00	+4,25	+4,00	+4,25	+4,00	+4,25	+4,00	+4,25	+4,00	+4,25 (-2,75)	
+4,25	+4,50	+4,25	+4,50	+4,25	+4,50	+4,25	+4,50	+4,25	+4,50 (-2,75)	
+4,50	+4,50	+4,50	+4,75	+4,50	+4,75	+4,50	+4,75	+4,50	+4,75 (-2,75)	
+4,75	+4,75	+5,00	+5,00	+4,75	+5,00	+4,75	+5,00	+4,75	+5,00 (-2,75)	
+5,00	+5,00	+5,25	+5,00	+5,00	+5,25	+5,00	+5,25	+5,00	+5,25 (-2,75)	
+5,25	+5,25	+5,50	+5,25	+5,50	+5,25	+5,50	+5,25	+5,50	+5,50 (-2,75)	
+5,50	+6,00	+5,75	+6,00	+5,75	+6,00	+6,00	+5,75	+6,00 (-2,75)	+5,75 (-2,75)	
+5,75	+6,50	+6,00	+6,50	+6,00	+6,50	+6,00	+6,50	+6,50 (-2,75)	+6,00 (-2,75)	
+6,00	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50	+6,50 (-2,75)	+6,50 (-2,75)	
+6,25	+6,50	+7,00	+7,00	+6,50	+7,00	+6,50	+7,00	+6,50	+6,50 (-2,75)	
+6,50	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00	+7,00 (-2,75)	
+6,75	+7,00	+7,50	+7,00	+7,50	+7,00	+7,50	+7,00	+7,50	+7,50 (-2,75)	
+7,00	+7,75	+7,50	+8,00	+7,50	+8,00	+8,00	+7,50	+8,00 (-2,75)	+7,50 (-2,75)	
+7,25	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00	+8,00 (-2,75)	+8,00 (-2,75)	
+7,50	+8,00	+8,00	+8,50 (-1,25)	+8,00	+8,50 (-1,75)	+8,00	+8,50 (-2,25)	+8,50 (-2,75)	+8,00 (-2,75)	
+7,75		+8,50 (-0,75)	+8,50 (-1,25)	+8,50 (-1,25)	+8,50 (-1,75)	+8,50 (-1,75)	+8,50 (-2,25)	+8,50 (-2,25)	+8,50 (-2,75)	

Sphères Biofinity® toric

Formules converties Sphères et Cylindres Lunettes/Lentilles pour MYOPES

Sphères Lunettes	Cylindres Lunettes										
	(-0,50)	(-0,75)	(-1,00)	(-1,25)	(-1,50)	(-1,75)	(-2,00)	(-2,25)	(-2,50)	(-2,75)	(-3,00)
Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan	-0,25	Plan (-2,75)	-0,25 (-2,75)
-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25	-0,50	-0,25 (-2,75)	-0,50 (-2,75)
-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50	-0,75	-0,50 (-2,75)	-0,75 (-2,75)
-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75	-1,00	-0,75 (-2,75)	-1,00 (-2,75)
-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25	-1,00 (-2,75)	-1,25 (-2,75)
-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25	-1,50	-1,25 (-2,75)	-1,50 (-2,75)
-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50	-1,75	-1,50 (-2,75)	-1,75 (-2,75)
-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75	-2,00	-1,75 (-2,75)	-2,00 (-2,75)
-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,00 (-2,75)	-2,25 (-2,75)
-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25	-2,50	-2,25 (-2,75)	-2,50 (-2,75)
-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50	-2,75	-2,50 (-2,75)	-2,75 (-2,75)
-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75	-3,00	-2,75 (-2,75)	-3,00 (-2,75)
-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00	-3,25	-3,00 (-2,75)	-3,25 (-2,75)
-3,25	-3,50	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25	-3,50	-3,25	-3,50 (-2,75)	-3,50 (-2,75)
-3,50	-3,75	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75	-3,50	-3,75 (-2,75)	-4,00 (-2,75)
-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75	-4,00	-3,75 (-2,75)	-4,25 (-2,75)
-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00	-4,25	-4,00 (-2,75)	-4,50 (-2,75)
-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25	-4,50	-4,25 (-2,75)	-4,75 (-2,75)
-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50	-4,75	-4,50 (-2,75)	-5,00 (-2,75)
-4,75	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75	-5,00	-4,75 (-2,75)	-5,25 (-2,75)
-5,00	-5,25	-5,00	-5,25	-5,00	-5,25	-5,00	-5,25	-5,00	-5,25	-5,00 (-2,75)	-5,50 (-2,75)
-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25	-5,50	-5,25 (-2,75)	-5,75 (-2,75)
-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50	-5,75	-5,50 (-2,75)	-6,00 (-2,75)
-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75	-6,00	-5,75 (-2,75)	-6,25 (-2,75)
-6,00	-6,25	-6,00	-6,25	-6,00	-6,25	-6,00	-6,25	-6,00	-6,25	-6,00 (-2,75)	-6,50 (-2,75)
-6,25	-6,50	-6,25	-6,50	-6,25	-6,50	-6,25	-6,50	-6,25	-6,50	-6,25 (-2,75)	-6,75 (-2,75)
-6,50	-6,75	-6,50	-6,75	-6,50	-6,75	-6,50	-6,75	-6,50	-6,75	-6,50 (-2,75)	-7,00 (-2,75)
-6,75	-7,00	-6,75	-7,00	-6,75	-7,00	-6,75	-7,00	-6,75	-7,00	-6,75 (-2,75)	-7,25 (-2,75)
-7,00	-7,25	-7,00	-7,25	-7,00	-7,25	-7,00	-7,25	-7,00	-7,25	-7,00 (-2,75)	-7,50 (-2,75)
-7,25	-7,50	-7,25	-7,50	-7,25	-7,50	-7,25	-7,50	-7,25	-7,50	-7,25 (-2,75)	-7,75 (-2,75)
-7,50	-7,75	-7,50	-7,75	-7,50	-7,75	-7,50	-7,75	-7,50	-7,75	-7,50 (-2,75)	-8,00 (-2,75)
-7,75	-8,00	-7,75	-8,00	-7,75	-8,00	-7,75	-8,00	-7,75	-8,00	-7,75 (-2,75)	-8,25 (-2,75)
-8,00	-8,25	-8,00	-8,25	-8,00	-8,25	-8,00	-8,25	-8,00	-8,25	-8,00 (-2,75)	-8,50 (-2,75)
-8,25	-8,50	-8,25	-8,50	-8,25	-8,50	-8,25	-8,50	-8,25	-8,50	-8,25 (-2,75)	-8,75 (-2,75)
-8,50	-8,75	-8,50	-8,75	-8,50	-8,75	-8,50	-8,75	-8,50	-8,75	-8,50 (-2,75)	-9,00 (-2,75)
-8,75	-9,00	-8,75	-9,00	-8,75	-9,00	-8,75	-9,00	-8,75	-9,00	-8,75 (-2,75)	-9,25 (-2,75)
-9,00	-9,25	-9,00	-9,25	-9,00	-9,25	-9,00	-9,25	-9,00	-9,25	-9,00 (-2,75)	-9,50 (-2,75)
-9,25	-9,50	-9,25	-9,50	-9,25	-9,50	-9,25	-9,50	-9,25	-9,50	-9,25 (-2,75)	-9,75 (-2,75)
-9,50	-9,75	-9,50	-9,75	-9,50	-9,75	-9,50	-9,75	-9,50	-9,75	-9,50 (-2,75)	-10,00 (-2,75)
-9,75	-10,00	-9,75	-10,00	-9,75	-10,00	-9,75	-10,00	-9,75	-10,00	-9,75 (-2,75)	-10,25 (-2,75)
-10,00	-10,25	-10,00	-10,25	-10,00	-10,25	-10,00	-10,25	-10,00	-10,25	-10,00 (-2,75)	-10,50 (-2,75)
-10,25	-10,50	-10,25	-10,50	-10,25	-10,50	-10,25	-10,50	-10,25	-10,50	-10,25 (-2,75)	-10,75 (-2,75)
-10,50	-10,75	-10,50	-10,75	-10,50	-10,75	-10,50	-10,75	-10,50	-10,75	-10,50 (-2,75)	-11,00 (-2,75)
-10,75	-11,00	-10,75	-11,00	-10,75	-11,00	-10,75	-11,00	-10,75	-11,00	-10,75 (-2,75)	-11,25 (-2,75)
-11,00	-11,25	-11,00	-11,25	-11,00	-11,25	-11,00	-11,25	-11,00	-11,25	-11,00 (-2,75)	-11,50 (-2,75)
-11,25	-11,50	-11,25	-11,50	-11,25	-11,50	-11,25	-11,50	-11,25	-11,50	-11,25 (-2,75)	-11,75 (-2,75)
-11,50	-11,75	-11,50	-11,75	-11,50	-11,75	-11,50	-11,75	-11,50	-11,75	-11,50 (-2,75)	-12,00 (-2,75)
-11,75	-12,00	-11,75	-12,00	-11,75	-12,00	-11,75	-12,00	-11,75	-12,00	-11,75 (-2,75)	-12,25 (-2,75)
-12,00	-12,25	-12,00	-12,25	-12,00	-12,25	-12,00	-12,25	-12,00	-12,25	-12,00 (-2,75)	-12,50 (-2,75)
-12,25	-12,50	-12,25	-12,50	-12,25	-12,50	-12,25	-12,50	-12,25	-12,50	-12,25 (-2,75)	-12,75 (-2,75)
-12,50	-12,75	-12,50	-12,75	-12,50	-12,75	-12,50	-12,75	-12,50	-12,75	-12,50 (-2,75)	-13,00 (-2,75)
-12,75	-13,00	-12,75	-13,00	-12,75	-13,00	-12,75	-13,00	-12,75	-13,00	-12,75 (-2,75)	-13,25 (-2,75)
-13,00	-13,25	-13,00	-13,25	-13,00	-13,25	-13,00	-13,25	-13,00	-13,25	-13,00 (-2,75)	-13,50 (-2,75)
-13,25	-13,50	-13,25	-13,50	-13,25	-13,50	-13,25	-13,50	-13,25	-13,50	-13,25 (-2,75)	-13,75 (-2,75)
-13,50	-14,00	-13,50	-14,00	-13,50	-14,00	-13,50	-14,00	-13,50	-14,00	-13,50 (-2,75)	-14,25 (-2,75)
-13,75	-14,50	-13,75	-14,50	-13,75	-14,50	-13,75	-14,50	-13,75	-14,50	-13,75 (-2,75)	-15,00 (-2,75)

Sphères Biofinity® toric

Exemple 1 (encadré orange)

Correction Lunettes : +4,50 (-1,50)
 Correction Lentilles : +4,75 (-1,75)
 La lentille Biofinity® toric à commander est donc : **+4,75 (-1,75)**

Exemple 2

Pour une correction lunettes de +1,25 (-0,50), la sphère Biofinity® toric à sélectionner est +1,00 et la case est blanche donc sans cylindre : commander une lentille Biofinity® sphérique +1,00D pour ce porteur.

ASTUCE

Pour un axe lunettes hors gamme lentilles, utilisez la règle des « GADS »
Gauche Ajoute, Droit Soustrait.

Exemple : pour une correction lunettes +4,50 (-1,50) 15°, 15° n'existant pas dans la gamme d'axe lentilles :

- ajouter 5° pour l'OG :
axe Biofinity® toric à 20° ,
- et soustraire 5° pour l'OD :
axe Biofinity® toric à 10° .

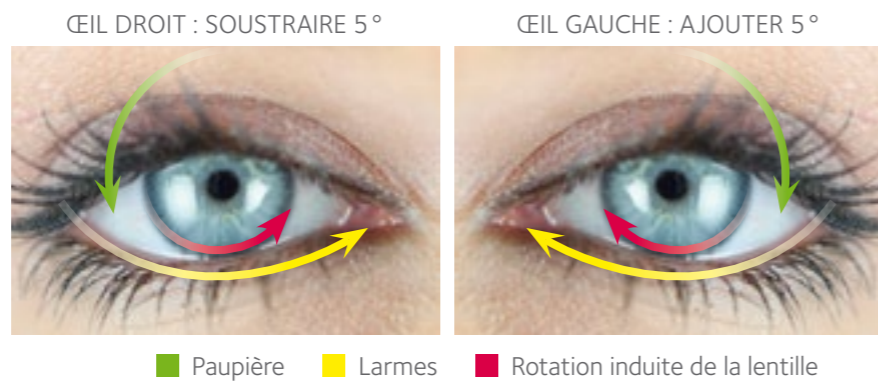


Table de Conversion Sphères Lunettes/Lentilles (distance verre/œil = 12 mm)

Pour une puissance lunettes $\geq \pm 4,00$ D, utilisez la table ci-dessous pour sélectionner la puissance équivalente en lentille.

Exemple (encadré orange)

Pour une réfraction ou un équipement lunettes de -6,75 D, la puissance équivalente lentilles est -6,25 D donc commander la puissance -6,00 D existante dans la gamme Biofinity®.

Sphères - Lunettes	Sphères - Lentilles	Sphères - Gamme Biofinity®	Sphères - Lunettes	Sphères - Lentilles	Sphères - Gamme Proclear® XR	Sphères + Lunettes	Sphères + Lentilles	Sphères + Gamme Biofinity®
-4,00	-3,75	-3,75	-14,75	-12,50	-12,50	+4,00	+4,25	+4,25
-4,25	-4,00	-4,00	-15,00	-12,75	-12,50	+4,25	+4,50	+4,50
-4,50	-4,25	-4,25	-15,25	-13,00	-13,00	+4,50	+4,75	+4,75
-4,75	-4,50	-4,50	-15,50	-13,00	-13,00	+4,75	+5,00	+5,00
-5,00	-4,75	-4,75	-15,75	-13,25	-13,00	+5,00	+5,25	+5,25
-5,25	-5,00	-5,00	-16,00	-13,50	-13,50	+5,25	+5,50	+5,50
-5,50	-5,25	-5,25	-16,25	-13,50	-13,50	+5,50	+6,00	+6,00
-5,75	-5,50	-5,50	-16,50	-13,75	-13,50	+5,75	+6,25	+6,50
-6,00	-5,50	-5,50	-16,75	-14,00	-14,00	+6,00	+6,50	+6,50
-6,25	-5,75	-5,75	-17,00	-14,00	-14,00	+6,25	+6,75	+7,00
-6,50	-6,00	-6,00	-17,25	-14,25	-14,00	+6,50	+7,00	+7,00
-6,75	-6,25	-6,00	-17,50	-14,50	-14,50	+6,75	+7,25	+7,50
-7,00	-6,50	-6,50	-17,75	-14,75	-14,50	+7,00	+7,75	+8,00
-7,25	-6,75	-6,50	-18,00	-14,75	-14,50	+7,25	+8,00	+8,00
-7,50	-7,00	-7,00	-18,25	-15,00	-15,00			
-7,75	-7,00	-7,00	-18,50	-15,25	-15,00			
-8,00	-7,25	-7,00	-18,75	-15,25	-15,00			
-8,25	-7,50	-7,50	-19,00	-15,50	-15,50			
-8,50	-7,75	-7,50	-19,25	-15,75	-15,50			
-8,75	-8,00	-8,00	-19,50	-15,75	-15,50			
-9,00	-8,00	-8,00	-19,75	-16,00	-16,00			
-9,25	-8,25	-8,00	-20,00	-16,25	-16,00			
-9,50	-8,50	-8,50	-20,25	-16,25	-16,00			
-9,75	-8,75	-8,50	-20,50	-16,50	-16,50			
-10,00	-9,00	-9,00	-20,75	-16,50	-16,50			
-10,25	-9,25	-9,00	-21,00	-16,75	-16,50			
-10,50	-9,25	-9,00	-21,25	-17,00	-17,00			
-10,75	-9,50	-9,50	-21,50	-17,00	-17,00			
-11,00	-9,75	-9,50	-21,75	-17,25	-17,00			
-11,25	-10,00	-10,00	-22,00	-17,50	-17,50			
-11,50	-10,00	-10,00	-22,25	-17,50	-17,50			
-11,75	-10,25	-10,00	-22,50	-17,75	-17,50			
-12,00	-10,50	-10,50	-22,75	-17,75	-17,50			
-12,25	-10,75	-10,50	-23,00	-18,00	-18,00			
-12,50	-10,75	-10,50	-23,25	-18,25	-18,00			
-12,75	-11,00	-11,00	-23,50	-18,25	-18,00			
-13,00	-11,25	-11,00	-23,75	-18,50	-18,50			
-13,25	-11,50	-11,50	-24,00	-18,75	-18,50			
-13,50	-11,50	-11,50	-24,25	-19,00	-19,00			
-13,75	-11,75	-11,50	-24,50	-19,00	-19,00			
-14,00	-12,00	-12,00	-24,75	-19,00	-19,00			
-14,25	-12,25	-12,00	-25,00	-19,25	-19,00			
-14,50	-12,25	-12,00	-25,25	-19,50	-19,50			
			-25,50	-19,50	-19,50			
			-25,75	-19,75	-19,50			
			-26,00	-19,75	-19,50			
			-26,25	-20,00	-20,00			
			-26,50	-20,00	-20,00			

Sphères + Lunettes	Sphères + Lentilles	Sphères + Gamme Proclear® XR
+7,50	+8,25	+8,50
+7,75	+8,50	+8,50
+8,00	+8,75	+9,00
+8,25	+9,25	+9,50
+8,50	+9,50	+9,50
+8,75	+9,75	+10,00
+9,00	+10,00	+10,00
+9,25	+10,50	+10,50
+9,50	+10,75	+11,00
+9,75	+11,00	+11,00
+10,00	+11,25	+11,50
+10,25	+11,75	+12,00
+10,50	+12,00	+12,00
+10,75	+12,25	+12,50
+11,00	+12,75	+13,00
+11,25	+13,00	+13,00
+11,50	+13,25	+13,50
+11,75	+13,75	+14,00
+12,00	+14,00	+14,00
+12,25	+14,25	+14,50
+12,50	+14,75	+15,00
+12,75	+15,00	+15,00
+13,00	+15,50	+15,50
+13,25	+15,75	+16,00
+13,50	+16,00	+16,00
+13,75	+16,50	+16,50
+14,00	+16,75	+17,00
+14,25	+17,25	+17,50
+14,50	+17,50	+17,50
+14,75	+18,00	+18,00
+15,00	+18,25	+18,50
+15,25	+18,75	+19,00
+15,50	+19,00	+19,00
+15,75	+19,50	+19,50
+16,00	+19,75	+20,00

Pour plus d'informations

COOPERVISION S.A.S.

Immeuble "les deux Arcs" - Bât. A & B - 1800 route des Crêtes

BP 273 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS Cedex

Tél. SERVICE CLIENTS : 04 92 96 62 62 ou

N°Azur 0 810 08 36 67 **N°Vert FAX 0 800 08 62 63**

PRIX D'APPEL LOCAL

APPEL GRATUIT

www.coopervision.fr



CooperVision™